


Système de diffuseur portable

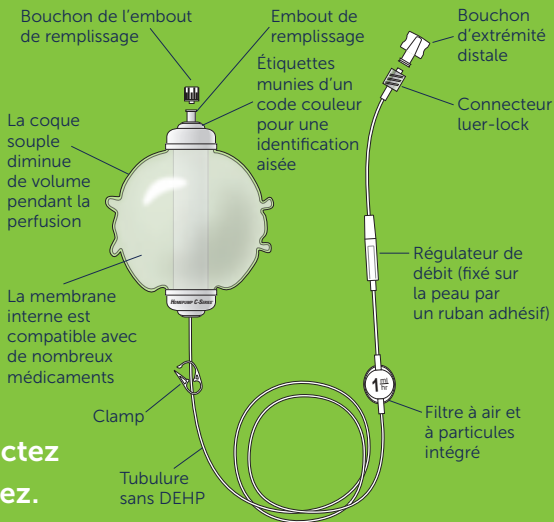

**Diffusez,
déconnectez
et éliminez.**

1. Assurez-vous que les clamps sont ouverts (tubulure du système HOME PUMP C-SERIES* et dispositif d'accès du patient).
2. Assurez-vous que la tubulure n'est pas pliée.
3. Assurez-vous que le diffuseur HOME PUMP C-SERIES* est à la température correcte :
 - a. Le diffuseur doit être à température ambiante avant le début de la perfusion.
 - b. Fixez le régulateur de débit à la peau du patient à l'aide de ruban adhésif.
 - c. Placez la tubulure sous les vêtements du patient.

LE DIFFUSEUR FACILE À PORTER OÙ QUE VOUS SOYEZ.

Comment puis-je savoir que la perfusion se diffuse ?

À mesure que la perfusion progresse, la couche externe du diffuseur devient moins tendue et se plisse. Le volume du diffuseur diminue ainsi peu à peu.

Comment puis-je savoir que la perfusion est terminée ?

La durée de la perfusion varie en fonction du volume et du débit du diffuseur. Lorsque la durée de perfusion est écoulée et que le diffuseur est vide, la perfusion est terminée. Un tube rigide est perceptible au centre du diffuseur.

Combien de temps faut-il au diffuseur pour atteindre la température ambiante ?

Volume (ml)	Sortie du réfrigérateur (heures)	Sortie du congélateur (heures)
60	7	12
100-125	8	16
270-300	12	25

Les diffuseurs Homepump sont des dispositifs médicaux de classe IIb pour l'administration de médicaments par voie intraveineuse. Ces produits ne doivent pas être utilisés avec le sang, les produits sanguins, les lipides, les émulsions lipidiques ou la nutrition parentérale. Organisme notifié : BSI (CE 0086). Fabricant : Halyard Health, 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004, USA. Lire attentivement les mises en garde, avertissements et instructions de la notice d'utilisation. Ces produits sont inscrits au Titre I de la liste mentionnée à l'article L 165-1 du Code de la sécurité sociale.

Tout dispositif médical comporte des risques inhérents. Pour connaître les **indications**, les **mises en garde**, les **avertissements** et les **contre-indications**, veuillez consulter l'étiquetage du produit. Le non-respect de l'étiquetage du produit pourrait mettre en péril la sécurité du patient. Le médecin est responsable de la prescription et de l'administration des médicaments, selon les instructions du fabricant des médicaments.