


Système de diffuseur portable

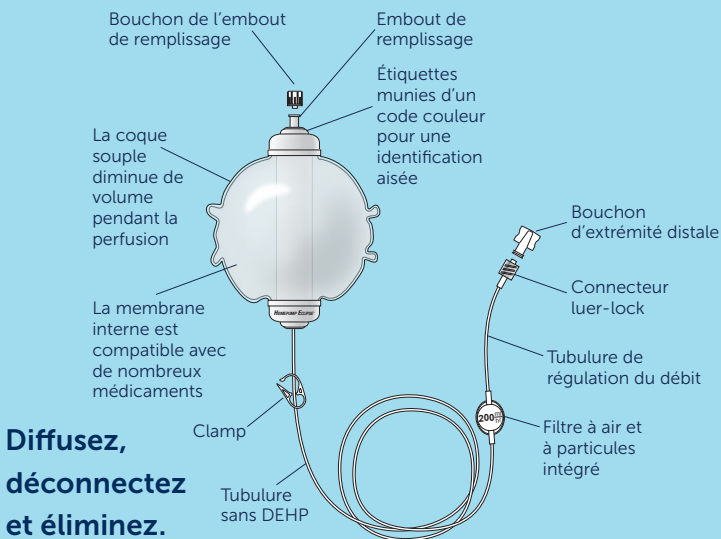

Diffusez, déconnectez et éliminez.

1. Assurez-vous que les clamps sont ouverts (tubulure du diffuseur HOME PUMP ECLIPSE* et dispositif d'accès du patient).
2. Assurez-vous que la tubulure n'est pas pliée.
3. Assurez-vous que le diffuseur HOME PUMP ECLIPSE* est à la température correcte :
 - a. Le diffuseur doit être à température ambiante avant le début de la perfusion.
 - b. Placez le diffuseur et la tubulure au-dessus des vêtements du patient.

Combien de temps faut-il au diffuseur pour atteindre la température ambiante ?

Volume (ml)	Sortie du réfrigérateur (heures)	Sortie du congélateur (heures)
50	7	12
100	8	16
250	12	25
400	15	29
500	18	30

Conseil : conseillez au patient de sortir le diffuseur contenant la dose suivante du réfrigérateur pendant que la perfusion de la dose actuelle est en cours. Chaque dose aura ainsi le temps d'atteindre la température ambiante avant utilisation.

Comment puis-je savoir que la perfusion se diffuse ?

Selon le volume du diffuseur, une modification du volume et de l'aspect du diffuseur doivent devenir visibles assez rapidement (30 minutes ou moins).

Quand la perfusion est-elle terminée ?

La durée de la perfusion varie en fonction du volume et du débit du diffuseur. Lorsque la durée de perfusion est écoulée et que le diffuseur est vide, la perfusion est terminée. Un tube rigide est perceptible au centre du diffuseur.

Les diffuseurs Homepump sont des dispositifs médicaux de classe IIb pour l'administration de médicaments par voie intraveineuse. Ces produits ne doivent pas être utilisés avec le sang, les produits sanguins, les lipides, les émulsions lipidiques ou la nutrition parentérale. Organisme notifié : BSI (CE 0086). Fabricant : Halyard Health, 5405 Windward Parkway, Alpharetta, GA 30004, USA. Lire attentivement les mises en garde, avertissements et instructions de la notice d'utilisation. Ces produits sont inscrits au Titre I de la liste mentionnée à l'article L 165-1 du Code de la sécurité sociale.

Tout dispositif médical comporte des risques inhérents. Pour connaître les **indications**, les **mises en garde**, les **avertissements** et les **contre-indications**, veuillez consulter l'étiquetage du produit. Le non-respect de l'étiquetage du produit pourrait mettre en péril la sécurité du patient. Le médecin est responsable de la prescription et de l'administration des médicaments, selon les instructions du fabricant des médicaments.